

Reparation av chipping på PFM eller PFZ med CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW

STANDARDPROCEDUR

1

FUKTKONTROLL

Användning av kofferdam är nödvändig för att skapa en tillräcklig isolering.

2

PREPARATION AV ADHESIONSYTAN

Rugga upp adhesionsytan med sandblästring med aluminiumoxid eller använd en fin diamantbör. Vid sandblästring ska lufttrycket och pulverstorleken anpassas till materialet och/eller formen på den protetiska restorationen. För bästa resultat behövs en bevel.

3

RENGÖRING AV ADHESIONSYTAN MED KATANA™ CLEANER

- 1 Dosera en lämplig mängd av KATANA™ Cleaner i en blandningskopp.
- 2 Applicera produkten med en gnuggande rörelse på adhesionsytan med appliceringsborsten i mer än 10 sekunder.
- 3 Skölj med vatten tills ingen lila färg längre är synlig på restorationens adhesionsyta.
- 4 Torka hela adhesionsytan noga med en mild oljefri luftström.



4

APPLICERING AV CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

- 1 Dosera en lämplig mängd av CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS i en blandningskopp omedelbart före applicering.
- 2 Applicera CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS på adhesionsytan med en appliceringsborste.
- 3 Torka hela adhesionsytan noga med en mild oljefri luftström.



5

MASKERING AV METALLEN

Maskera metallen med CLEARFIL™ ST OPAQUER. Applicera produkten med en tjocklek inte över 0,5 mm på metallytan. Ljushärda pastan med en dental härdljuslampa.



6

Applicera CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW

Välj den lämpliga färgen och flytbarheten. Applicera på de primade frakturytorna och ljushärda med en dental härdljuslampa.



7

Finishing

Konturera restorationen och justera ocklusionen med en fin diamantbör. Polera med silikonspetsar eller polertrissor (t.ex. CLEARFIL™ TWIST DIA) på vanligt sätt.



ARBETSGÅNG METALLKERAMIK (PFM)

Fortsätt med steg 5

5

ARBETSGÅNG ZIRKONIA (PFZ)

Fortsätt med steg 6

6

Notera:

Om tandytan är en del av adhesionsytan, applicera ett bondingmaterial (t.ex. CLEARFIL™ SE BOND eller CLEARFIL™ Universal Bond Quick) på området enligt bruksanvisningen.

Ansvarsfriskrivning:

OBSERVERA. Detta är en sammanfattad procedur, läs bruksanvisningen som följer med varje produkt, före användning.